


mikroqid® universal wipes

Nízkoalkoholové ubrousky na rychlou dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků. 	Nízkoalkoholové ubrousky na rychlou dezinfekci a čištění malých ploch a povrchů.
--	--

mikroqid® universal wipes se doporučuje na rychlou dezinfekci různých povrchů, včetně citlivých povrchů, např. z makrolonu, akrylátového skla, polysulfonu a syntetické kůže i povrchů neinvazivních zdravotnických pomůcek a přístrojů, jako jsou displeje, klávesnice, obslužná pole a dotykové obrazovky medicínského inventáře.

Návod k použití: Důkladně otírejte povrch nasáklou jednorázovou utěrkou a nechte působit. Dbejte na úplné zvlhčení povrchu. V případě požadované účinnosti na Adenovirus a Mycobacterium tuberculosis udržujte plochu vlhkou po celou dobu expozice. Zajistěte, aby bylo před desinfekcí odstraněno veškeré viditelné znečištění. Po použití obal těsně uzavřete. Není určený k finální dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků. Výrobek lze používat bez rukavic, pokud to připouští předpisy pro ochranu zdraví při práci a prevence HAV nákaz.

Složení: Softpack obsahuje 100 vlhčených utěrek připravených k okamžitému použití. 100 g roztoku obsahuje: 17,4 g propan-2-ol (EC 200-661-7), 12,6 g ethanol (94 % w/w) (EC 200-578-6).
Značení dle Nařízení (ES) 648/2004: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky

Spektrum účinnosti: baktericidní, levurocidní, virucidní (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené viry – HBV, HCV, HIV)


Bezpečnostní pokyny: VAROVÁNÍ: H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. **První pomoc:** Při VDECHNUTÍ - odstaňte zdroj expozice, zajistěte přívod čistého vzduchu, při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Při POŽITÍ - NEVYVOLÁVEJTE zvracení, vypláchněte ústa vodou, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zvláštní upozornění: Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba oznámit výrobcí a příslušnému úřadu. **Skladování:** Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před mrazem, teplem a slunečním světlem. Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. **Likvidace:** Recyklujte pouze prázdné obaly. Zbytky náplně lze likvidovat společně s komunálním odpadem. Vhodnost spektra účinnosti pro zamýšlenou oblast použití je třeba přezkoušet. Rozsah dezinfikované plochy závisí na teplotě v místnosti a na struktuře dezinfikovaného povrchu. Více informací na vyžádání. Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Distributor v CZ: Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81, Bohumín, Česká republika, tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz

SK - dolepka

mikroqid® universal wipes

Utierky s nízkym obsahom alkoholu na rýchlu dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych pomôcok. 	Utierky s nízkym obsahom alkoholu na rýchlu dezinfekciu a čistenie malých plôch a povrchov. bio/1515/D/17/CCHLP
--	---

mikroqid® universal wipes sa odporúča na rýchlu dezinfekciu rôznych povrchov vrátane citlivých povrchov, napr. z makrolónu, akrylového skla, polysulfónu alebo umelej kože ako aj povrchov neinvazívnych zdravotníckych pomôcok a prístrojov ako sú displeje, klávesnice, ovládacie polia a dotykových obrazoviek.

Návod na používanie: Plochu dôkladne utrite navlhčenou utierkou a nechajte pôsobiť. Dbajte na úplné zvlhčenie povrchu. V prípade požadovanej účinnosti na Adenovírus a Mycobacterium tuberculosis udržiavajte plochu vlhkú po celú dobu expozície. Zabezpečte, aby boli pred dezinfekciou odstránené všetky viditeľné znečistenia. Po použití riadne zatvorte uzáver balenia. Nie je určený na záverečnú dezinfekciu semikritických a kritických zdravotníckych pomôcok. Pokiaľ to dovoľujú predpisy na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci, a prevencie šírenia nákaz tento výrobok je možné používať aj bez rukavíc.

Zloženie: balenie obsahuje 100 vlhkých obrúskov hotových na použitie. 100 g roztoku obsahuje účinné zložky: 17,4 g propán-2-ol (EC 200-661-7), 12,6 g etanol (94 % w/w) (EC 200-578-6)

Spektrum účinnosti: baktericídny, levurocídny, virucídny (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené vírusy – HBV, HCV, HIV) **Označenie podľa Nariadenia (ES) č. 648/2004:** < 5% aniónové povrchovo aktívne látky.

Informácie o riziku a bezpečnostné pokyny: POZOR: H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. **Prvá pomoc:** Pri vdýchnutí - odstráňte zdroj expozície, zaistite postihnutému prívod čistého vzduchu, pri pretrvávajúcich problémoch privolajte lekára. Pri POŽITÍ - NEVYVOLÁVAJTE zvracanie, vypláchnite ústa vodou, vyhľadajte lekársku pomoc.

Zvláštne upozornenia: **Len na profesionálne použitie.** Akékoľvek vážne incidenty súvisiace s výrobkom treba oznámiť výrobcovi a príslušnému úradu. **Skladovanie:** Balenie uchovávajte tesne uzavreté. Chráňte pred mrazom, teplom a slnečným svetlom. Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. **Likvidácia:** Obal recyklujte až po jeho dokonalom vyprázdnení. Zvyšky náplne môžu byť likvidované spoločne s domovým odpadom. Vhodnosť spektra účinnosti pre zamýšľanú oblasť použitia je potrebné preskúšať. Rozsah dezinfikovanej plochy závisí od teploty v miestnosti a od štruktúry dezinfikovaného povrchu. Viac informácií na vyžiadanie. Spotrebujte do dátumu na obale.

Distributor v SK: Schulke SK, s.r.o. • Moštenická 3 • 971 01 Prievidza • Slovenská republika •
tel.: +421 465 494 587, www.schulke.sk.

Doby působení (platí pro aktivní roztok) / Doby posobenía (vzťahuje sa na roztok účinnej látky)	
baktericidní 1) / baktericídny 1)	1 min.
levurocidní 2) / levurocídny 2)	1 min.
obalené viry 3) / obalené vírusy 3)	15 sek.
omezeně virucidní 3) / obmedzene virucídny 3)	15 min.
tuberkulocidní 4) / tuberkulocídny 4)	5 min.
Polyoma SV 40 5)	15 sek.
Noroviry 6) / Norovírusy 6)	30 sek.

1) EN 13727 + EN 16615 - nízká zátěž / níзка záťaž, 2) EN 13624 + EN 16615 - nízká zátěž / níзка záťaž,
3) EN 14476 - vysoká zátěž / vysoká záťaž, 4) EN 14348 - nízká zátěž / níзка záťaž, 5) Dle směrnice / podľa
smernice DVV/RKI 12/2014, 6) MNV EN 14476 - nízká zátěž / níзка záťaž



UFI :D520-U02H-D007-C3DQ



Výrobce/Výrobca: Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt
Germany, tel.: +49 40/521 00-0, Made in Germany.



Číslo šarže/ Datum trvanlivosti/
Datum výroby



Číslo šarže/ Datum trvanlivosti/
Datum výroby

Verze: 02.2022 Objednávkové číslo: 70000038

Verzia: 02.2022 Objednávkové číslo: 70000038

Product Name: mikroZid Universal wipes premium. Mat. No.: 20003954. Index: A. Dimensions: 320 x 420 mm. Package: Flowpack. Country: 6-sprachig. EAN: 4032651957774.

Main product information area containing: 'Cleaning and disinfection', 'Noro 30 sec.', 'Perfume free', 'mikroZid® universal wipes premium', 'Gentle to material', 'Respecte les matériaux', 'Delicato sui materiali', 'Produkt delikatny dla materiału', 'Materiaalvriendelijk', 'DE Product eignet sich zur...', 'EN The product is suitable for...', 'FR Le produit est indiqué pour...', 'NL Het product is geschikt voor...'. Includes icons for 'LOW-ALCOHOL BASED', 'RAPID EFFECT', 'GENTLE ON SURFACES', 'DERMATOLOGICALLY TESTED', and safety symbols.

50 mm, 70 mm, 100 mm, 70 mm, 50 mm

200 mm, 320 mm